








AQUA ELLA.
Hydration 2 in 1 Peeling System

取扱説明書

安全にご利用いただくために

- 機器をご使用になる前に、すべての安全情報を読み正しくお使いください。
 - 安全に使用するためには、いくつかの注意マークやメモがあります。
 - 間違った方法で使用すると予期せぬ事故を起こす可能性があります。
- 以下の諸注意を良く読んでご利用ください。

 危険	<p>誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されることを示します。</p>
 注意	<p>誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性が想定されることを示します。</p>
 警告	<p>誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定されることを示します。</p>
 禁止	<p>機器の分解など、してはいけないこと「禁止」を示します。</p>
 強制	<p>必ず守る「強制」を示します。</p>

	<p>分解や改造はしないでください。 ※予期せぬ怪我や火災の恐れがあります。</p>
	<p>磁石・磁気を近づけないでください。 ※故障の原因や火災の恐れがあります。</p>
	<p>故障や破損した器具を使わないでください。 ※予期せぬ怪我や事故の恐れがあります。</p>
	<p>小さなお子様や障がいのある方に使用しないでください。 ※予期せぬ怪我や感電の恐れがあります。</p>
	<p>タコ足配線での使用はしないでください。 ※予期せぬ怪我や感電の恐れがあります。</p>
	<p>濡れた手での操作はしないでください。 ※予期せぬ怪我や感電・故障の恐れがあります。</p>
	<p>機器に水がかからないようにしてください。 ※予期せぬ怪我や感電・故障の恐れがあります。</p>
	<p>湿度の高い環境での使用は避けてください。 ※予期せぬ怪我や感電・故障の恐れがあります。</p>
	<p>本機器に付属のパーツ以外は使用しないでください。 ※故障の原因や怪我の恐れがあります。</p>
	<p>直射日光や極度に暑い場所、水回りでの使用はしないでください。 ※予期せぬ怪我や感電の恐れがあります。</p>
	<p>機器はストーブやヒーターの近くで使用しないでください。 ※故障の原因や火災の恐れがあります。</p>
	<p>機器やハンドピースの落下には十分ご注意ください。 ※故障の原因になります。</p>
	<p>雷の発生時には使用を中止してください。 ※火災や感電の恐れがあります。</p>
	<p>異音や異臭など機器に不具合がある場合は使用を中止し、販売店またはメーカーへご連絡ください。</p>
	<p>機器は平らな場所に設置してご使用ください。 ※故障の原因になります。</p>

パッケージ内容



- ① 本体 (ハンドピース付属)
- ② トルネードチップ
- ③ ダストボトル
- ④ ダストボトルホルダー
- ⑤ ハンドピースホルダー
- ⑥ アクアエラ ソリューション A・B 各1本
洗浄用ボトル 1本
- ⑦ ACアダプター、電源コード 各1個、予備パッキン、
(A) ホルダー取り付けネジ 2本
(B) ダストボトル取り付けネジ 2本
- ⑧ 【別売】 アクアエラ ソリューション A・B 2,000ml



チップ交換の際、
パッキンの粉失にご注意ください。

■各部の名称と操作方法

①ソリューションコントローラー

このダイヤルはソリューションの流量を調節するダイヤルです。
左に回すと流量が増え、右に回すと流量が減ります。

②バキュームコントロール

このダイヤルは吸引のレベルを調整するダイヤルです。
右に回すと吸引が強くなり、左に回すと吸引が弱くなります。

③スタート/ストップボタン

このボタンで施術の開始・停止を行います。

④モードセレクトボタン


使用するソリューションを選択します。
ボタン左右の赤いランプで選択中ソリューションが表示されます。

⑤時間調整ボタン

左：ダウン 右：アップ で施術時間が変更可能です。
※基本設定は5分（推定）にセットされています。
※スタートボタンを押した後設定変更が可能です。

⑥タイマー

施術の残り時間が表示されます。

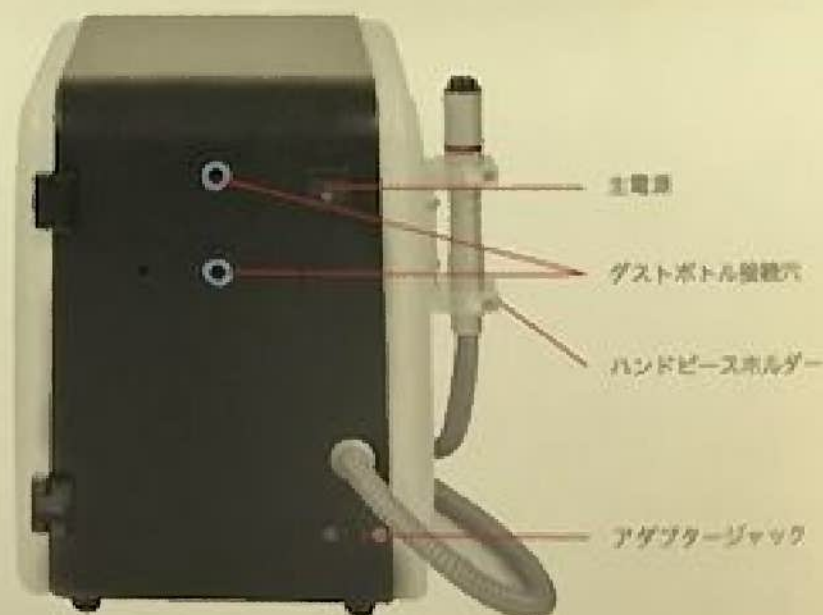

■使用方法

準備

- ① ハンドピースホルダーを本体左側面に付属の長ネジ（2本）で取り付けます。（開口部が広い方が上向き）
- ② ダストボトルホルダー本体背面に付属の短ネジ（2本）で取り付けます。
ダストボトルを取り付けます。チューブをしっかりと差込んでください。
- ③ 本体右側を開け、各ソリューションをセットします。（左A剤、右B剤）
- ④ 本体背面に電源アダプターを差込みます。
- ⑤ アダプターに電源コードを差込み、アダプターを本体に接続します。差込口の平らの面を下に向けてください。
（本体電源がOFF「○」の状態であることを確認してください。）
コンセントに電源ケーブルを差込み、主電源をONにして準備完了です。



お手入れ

- 機器のクリーニング
 - ・クリーニング用ボトルに精製水を入れソリューションと同様にセットしてください。
 - ・機器を運転しノズルを手のひら等に数十回（2分程度）運転してください。A・B両方行ってください。
 - ※ ダストボトルは水・または中性洗剤でしっかりと洗浄しよく乾かしてください。（パッキンの紛失にご注意ください）
 - ※ ハンドルチップは消毒液でしっかりと洗浄しよく乾かしてください。（パッキンの紛失にご注意ください）

注意

- 使用後はすぐに電源を切るか、ソリューションの選択を「A」の状態にしてください。
- 電源ケーブルやアダプターの抜き差しは必ず本体電源をOFF「○」の状態にしてください。



■ 施術方法

Solution A

水溶性の汚れを取り除きます。角質の除去・シミ・ソバカス・色素沈着に効果的です。



①首からアゴ下へ向かって施術します。



②アゴ下から耳とぶ方向へ向かって施術します。



③唇の下・口元からもあげ方向へ施術します。



④鼻の下・鼻翼から頬骨・目尻方向へ施術します。
※手順が終了したらもう片方も①～④を繰り返してください



⑤鼻部分は上から下へ向かって施術します。



⑥額部分から生え際まで、上へ向かって施術してください。

Solution B

脂溶性の汚れを取り除きます。角栓の除去・ニキビ・毛穴の汚れに効果的です。



①鼻部分は上から下へ向かって施術します。



②額部分から生え際まで、上へ向かって施術してください。



③ニキビ・ニキビ跡の気になる部分をピンポイントに施術します。

施術に際しての注意

- 施術前にメイクを落としてください。
- 機器指定のソリューション以外は使用しないでください。
- ソリューションを水などで薄めると pH 値が変わるので、薄めて使用しないでください。
- 施術部位に肌トラブルがある際はご使用をお控えください。
- お肌の状態にあわせて吸引レベルを調整してください。

本保証書をよくお読みの上、大切に保管してください。

- 1 (株) WAFMラボラトリーは下記の通りに商品を保証致します。
- 2 商品に使用に関するお問い合わせは、ご購入先の販売店へご連絡ください。
- 3 商品本体の保証期間は1年です。ご購入から1年以内(保証期間中)であれば無償で商品を修理いたします。
- 4 保証期間外の修理費・輸送費・出張費は有償となります。
- 5 下記の問題があった場合には保証期間内でも修理費・輸送費・出張費をお支払いいたします。
 - ・使用者の不注意、故意の修理、改造による故障
 - ・(株) WAFMラボラトリーから指示された店舗、もしくはカスタマーセンターの技術者以外の修理による故障
 - ・使用中・使用中の落下などによる故障またはダメージ
 - ・(株) WAFMラボラトリーに指示されていない商品やオプション使用による故障
 - ・自然災害による故障(火事、地震、落雷等)
- 6 保証説明書に記載された内容を守らずに生じた病弱、健康被害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 7 本商品の使用または、使用不能から生ずる付随的な損失(事業利益の損失・事業の中断)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 8 この保証書は国内での使用の場合のみ適用されます。使用説明書と一緒に保存して下さい。本保証書をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証期間	1年	*お客様	ご住所
*お引き渡し日	平成 31 年 3 月 4 日		お名前
シリアル No.	S/N WAE-162002		電話

販売店へ、*印欄は必ず記入してお送り下さい。

*販売店	印
------	---

*販売店がない場合は保証できませんのでご注意ください。

*この保証書は、本書に記載した範囲、条件のもとにおいて有効期間をお約束するものではありません。

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過の事項については弊社の場合は、お問い合わせの販売店にお問い合わせ下さい。